

BESKRIVNING CYKEL	NOMINELLA VÄRDEN				BASPARAMETRAR FÖR CYKELN					STERILISERBART MATERIAL				OBS
	Temperatur (°C)	Tryck (bar)	Hålltid (min)	Cykeltyp (EN 13060:2014)	Förvakuum (F=fraktionerad; S=enskilt)	Standardtorkning (min)	Total cykeltid (max last)	Max förbrukning H ₂ O (ml/cykel)	Genomsnittlig strömförbrukning (kWh/cykel)	TYOLOGI	MAX TOTALVIKT (kg)	MAX TOTALVIKT FÖR BRICKA (kg)	MAX TOTALVIKT FÖR ARTIKEL (kg)	
134°C UNIVERSELL	134	2,10	4 (*)	B	F	12,75	58+61	550	0,8	Poröst oförpackat material	0,60	0,30	0,30	För material och instrument i samma förpackning (enkel och dubbel) rekommenderar vi att du använder konfigurationen för 3 brickor
										Poröst material i samma förpackning	0,50	0,25	0,25	
										Poröst material i dubbel förpackning	0,40	0,20	0,20	
										Fast material och kablar i samma förpackning	2,00	1,33	0,25	
										Oförpackade solida material och kablar	4,00	1,33	0,50	
										Solida instrument och kablar "A" i dubbel förpackning	1,00	1,33	0,25	
134°C PRIONER	134	2,10	>18	B	F	12,75	58+61	600	0,9	Poröst oförpackat material	0,60	0,30	0,30	
										Poröst material i samma förpackning	0,50	0,25	0,25	
										Poröst material i dubbel förpackning	0,40	0,20	0,20	
										Fast material och kablar i samma förpackning	2,00	1,33	0,25	
										Oförpackade solida material och kablar	4,00	1,33	0,50	
										Solida instrument och kablar i dubbel förpackning	1,00	1,33	0,25	
121°C UNIVERSELL	121	1,10	20	B	F	12,75	70+73	600	0,8	Poröst oförpackat material	0,60	0,30	0,30	
										Poröst material i samma förpackning	0,50	0,25	0,25	
										Poröst material i dubbel förpackning	0,40	0,20	0,20	
										Oförpackade solida material och kablar	4,00	1,33	0,50	
										Fast material och kablar i samma förpackning	2,00	1,33	0,25	
										Solida instrument och kablar i dubbel förpackning	1,00	1,33	0,25	
134°C KABLAR INTE PAKETERADE	134	2,10	4 (*)	S	F	3,5	47+50	550	0,8	Oförpackade instrument och kablar	4,00	1,33	0,50	
										Oförpackade solida material och kablar	4,00	1,33	0,50	
134°C FASTA PAKETERADE ÄMNEN	134	2,10	4 (*)	S	S	12,75	43+46	325	0,7	Solida instrument och kablar "B" med samma emballage	2,00	1,33	0,25	Vi rekommenderar att du använder konfigurationen för 3 brickor
										Oförpackade solida material och kablar "B"	4,00	1,33	0,50	
XXX°C ANVÄNDARE (se anteckning)	134 - 121	2,10 - 1,10	4+30 - 20+30	ej tillg.	F/S	5+30	ej tillg.	ej tillg.	ej tillg.	Solida oförpackade instrument (andra laster är möjliga beroende på användarens inställningar)	ej tillg.	ej tillg.	ej tillg.	Variabla parametrar beroende på inställningarna
HELIX/BD-TEST	134	2,10	3,5	-	F	0,83	35	-	-	Endast testanordningar (utan annan last)	-	-	-	
VAKUUMTEST	-	-0,80	-	-	-	-	27	-	-	Vakuum kammare	-	-	-	
VAKUUM- + HELIX/BD-TEST (kan genomföras i sekvens)	134	2,10	4 (*)	B	F	12,75	58+61	550	0,8	-	-	-	-	